

# NOTICE D'UTILISATION DE LA POMPE AMIKA



On / Off



Marche



Vérouillage clavier



Arrêt



Silence alarme



Menu



Purge



Réglage du débit et du volume cible

## Accès au menu

Appuyer sur la touche 

Faire défiler les items et entrer dans les menus par la touche (ou valider une action) 

Revenir à l'écran précédent par 



Activation / désactivation du volume cible



Activation / désactivation du Mode nuit



Réglages sonore



Activation / désactivation du Verrouillage réglages (code d'accès nécessaire)



Compteur de volume total administré



Historique des alarmes



Historique des administrations



Réglage Contraste / luminosité



Réglage du temps entre 2 sons d'alarme (code d'accès nécessaire)



Ajustement du temps entre le message "Volume cible presque atteint" et l'alarme "Volume cible atteint" (code d'accès nécessaire)

**Avant et après le passage du produit de nutrition, il est indispensable de rincer soigneusement la sonde avec de l'eau à l'aide d'une seringue de gavage.**

### **Mise en place de la tubulure**

Connecter la tubulure à la poche d'alimentation en s'assurant que le clamp soit bien fermé

Déverrouiller la porte de la pompe au moyen du levier. Ouvrir la porte

En respectant le sens de la flèche, placer le clamp de sécurité dans son logement

Faire passer la tubulure sur le mécanisme d'entraînement et la fixer dans le guide en s'assurant qu'elle n'est pas distendue

Refermer la porte de la pompe. Veiller à ce qu'elle s'enclenche bien

### **Mise en marche**

Allumer la pompe en appuyant pendant quelques secondes sur la touche 

### **Purge de la tubulure**

Pour afficher le menu purge, appuyer une fois sur la touche 

Une fois le menu affiché, appuyer sur la touche 

Lorsque la purge est terminée, appuyer de nouveau sur 

### **Programmation de la pompe**

Réglage du débit :

Appuyer sur les touches   en face de la valeur signalée par  jusqu'à obtenir la valeur souhaitée.

Réglage du volume cible (facultatif) :

Appuyer sur les touches   en face de la quantité affichée en mL jusqu'à obtenir la quantité de produit à administrer.

### **Démarrage de la nutrition**

Après purge de la tubulure et programmation du débit,

appuyer sur la touche  pour débiter l'administration de la nutrition

### **Arrêt de la nutrition**

Pour interrompre l'administration de la nutrition, appuyer sur la touche 

Maintenir la touche  appuyée pendant une seconde pour éteindre la pompe

Penser à maintenir la pompe branchée sur secteur pour recharger la batterie

## ALARMES ET ACTIONS CORRECTIVES

Si une alarme se déclenche :

Couper le son de l'alarme (si besoin) 

Détecter la cause de la mise en alarme et prendre les mesures appropriées



### Batterie vide

Brancher immédiatement la pompe sur l'alimentation secteur



### Porte ouverte

Fermer la porte de la pompe




### Poche vide / air dans la tubulure

Si la poche est vide, changer la poche. Dans le cas contraire, vérifier qu'il n'y a pas de bulle d'air dans la tubulure



### Volume cible presque atteint

Continuer l'administration; il reste quelques minutes d'administration avant d'atteindre le volume cible

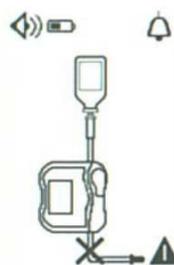


### Occlusion aval

Vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion dans la partie de la tubulure située après la pompe, du côté du patient



### Installation de la tubulure

Contrôler la position de la tubulure en entrée et en sortie du mécanisme de la pompe et l'insérer correctement

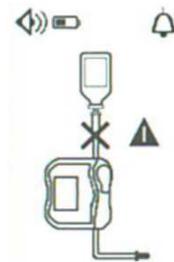

### Occlusion amont

Vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion dans la partie de la tubulure située entre la poche et la pompe



### Erreur technique

Relever le code erreur technique et contacter le personnel du prestataire chargé de la maintenance de la pompe